

KATILIMCI BİLGİLENDİRME TALİMATI

Yeterlilik Deney Turu Kodu	EVKEM/26/PT013/1*
Yeterlilik Deney Turu Adı	Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile Tespiti
Koordinatör	Pelin AYÇA DEMİR
	Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR
Koordinatör İletişim Bilgiler	Tel: 0442 316 81 42/11 Mail: pelinayca.demir@tarimorman.gov.tr
	Tel: 0442 316 81 42/1119 Mail: perihanserifoglu.bagatir@tarimorman.gov.tr
Başvuru Tarihi	02.02.2026
Son Başvuru Tarihi	06.02.2026
Numunelerin Gönderilmesi	09.02.2026
Analiz Sonuçlarının Gönderilmesi	20.02.2026
Raporlama Tarihi	27.02.2026
Sonuçlara İtiraz	27.02.2026-06.03.2026
Ücretlendirme	85.961 TL (%20 KDV hariç) Türk Lirası

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Adres: Adnan Menderes Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:6 25070
Palandöken/ERZURUM

Telefon: 0 442 316 81 42 - 317 07 32

Faks: 0 442 317 07 33

E-Posta : erzurum.vke@tarimorman.gov.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	1 / 10

1. AMAÇ

Bu dokümanda EVKEM/26/PT013/1* kodu ile düzenlenen yeterlilik deney turunda izlenecek yöntemler tarif edilmektedir.

2. KAPSAM

Bu doküman Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından, TS EN ISO / IEC 17043 standardında tanımlı nitel program şartlarına uygun olarak planlanan; Embriyolu tavuk yumurtasından elde edilen inaktif liyofilize Chorio Allantoik Sıvı (CAS)'dan **“Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) Matrix (M), H5, H7, H9, N1 ve N8 proteini gen bölgelerinin Real Time RT-PCR ile Tespiti”** Yeterlilik Deney programını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Birimi	Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Kalite Yönetim Birimi	Anıl İnan CEBECİ	KYB Başkanı	- Yapılan tüm iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemi yönünden kontrolü
Koordinatör	Pelin Ayça DEMİR	Veteriner Hekim	- Yeterlilik deney programının planlanması - Yeterlilik deneyi katılımcılarının performanslarının değerlendirilmesi
	Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR	Veteriner Hekim	- Yeterlilik deney raporlarının düzenlenmesi
Teknik Ekip	Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM	Veteriner Hekim	- Uygun yeterlilik deney numunesinin seçimi - Özel cihazların kullanımı - Kararlılık ve homojenliğin ve ayrıca atanmış değerler ve yeterlilik deney numunesinin ölçülen büyüklüğüne ait toplam belirsizliğin belirlenmesi ile ilgili ölçümlerin yapılması
	Sebahattin AKÇA	Veteriner Hekim	



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	2 / 10

			- Yeterlilik deney numunelerinin hazırlanması, taşınması ve dağıtımı - Görüş bildirme, yorumlama
Numune Alma	Burak ÇEVİK	Veteriner Hekim	- Belirli şekillerdeki numune alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
	İsmail DUMAN	Veteriner Hekim	- Belirli şekillerdeki numune alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

4. TEDARİKÇİ

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen embriyolu tavuk yumurtasından elde edilen Chorio Allantoik Sıvı'dan Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) Matrix (M), H5, H7, H9, N1 ve N8 proteinin gen bölgelerinin Real Time RT-PCR ile Tespiti yeterlilik testi turunda Ulusal Referans olan Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır.

5. KATILIM KRİTERLERİ

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen embriyolu tavuk yumurtasından elde edilen inaktif liyofilize Chorio Allantoik Sıvı'dan Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) Matrix (M), H5, H7, H9, N1 ve N8 Proteininin gen bölgelerinin Real Time RT-PCR ile Tespiti yeterlilik deney turunda, adı geçen parametrelerde performanslarını değerlendirmek isteyen tüm deney laboratuvarları katılabilir. Söz konusu yeterlilik deneyi tek aşamada gerçekleşecek olup; katılımcılardan Avian Influenza A Virusunun Matrix (M) proteini Avian Influenza A Virusunun H5, H7, H9, N1 ve N8 gen bölgelerinin Real Time RT-PCR ile analiz edilip sonuç bildirmeleri istenecektir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	3 / 10

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yeterlilik deney turunda yeterlilik deney programı komisyonunun aldığı kararla doğrultusunda yeterlilik test katılım ücreti 85.961 TL(%20 KDV hariç) Türk Lirası ücret talep edilir.

Yeterlilik testi programının yürütülmesi ve sonuç değerlendirme raporlarının düzenlenmesi için katılımcı sayısının en az 2 olması planlanmaktadır. Katılımın planlanan sayıdan az olması durumunda deney turu ileri bir tarihe ertelenerek katılımcılar bilgilendirilir.

Katılımcı kontenjanları KYB Komisyonu tarafından belirlenir. Kontenjan sayısının aşılması durumunda tarih sırasına göre son başvuruda bulunan katılımcı ve/veya katılımcılar resmi yazı ve mail kanalıyla tura dâhil olamayacakları konusunda bilgilendirilirler.

6. ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Yeterlilik deney turu kapsamındaki ölçüm parametreleri aşağıda verilmiştir:

Yeterlilik Testinde

Düzenlenen inaktif liyofilize Chorio Allantoik Sıvı'dan Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) Matrix (M) proteini H5, H7, H9, N1 ve N8 proteini gen bölgelerinin Real Time RT-PCR ile Tespiti analiz sonuçları YT-F-402.13 Sonuç Bildirim Formu'na Pozitif veya Negatif olarak belirtilmelidir.

7. YETERLİLİK TESTİ NUMUNELERİ

Tek aşama şeklinde planlanan Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile Tespiti Yeterlilik Testi numuneleri katılımcılara gönderilecektir.

Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) Matrix (M) proteini ve H5, H7, H9, N1 ve N8 proteinlerine ait gen bölgeleri negatif ve pozitif inaktif liyofilize Chorio Allantoik örnekleri içeren 2 ml hacimli vial tüplere konularak katılımcılara 09.02.2026 tarihinde gönderilir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	4 / 10

Her bir yeterlilik deney programı katılımcısı için 5 adet numune hazırlanır.

Hazırlanan yeterlilik deney numuneleri ambalajlara alınarak -20 °C'de muhafaza edilir.
Her bir ambalaja yeterlilik deneyi program kodu numarası yazılır.

Yeterlilik testi numuneleri homojenite ve ilk stabilite testleri yapıldıktan sonra aynı günde tüm katılımcılara iletilecek şekilde gönderilir. Yeterlilik Test Numuneleri katılımcı tarafından teslim alındıktan sonra -20 °C'de muhafaza edilmelidir. Etiket bilgilerinde de yer alan laboratuvar koşullarında analiz gerçekleştirilir. (Ortam Sıcaklığı : (23 ± 2) °C Bağıl Nem Değer: $\% (45 \pm 10)$ şartlarda olmalıdır.) Analizi gerçekleştirilen yeterlilik test numuneleri -20 veya -80 °C'de saklanması tavsiye edilir.

Yeterlilik testi duyurusunda belirtilen süre içinde katılımcıların sonuçlarını göndermesi beklenir.

Düzenlenen yeterlilik testi programlarının amacına ulaşması için katılımcıların test numunelerini bizzat kendilerinin analiz etmesi gerekir.

8. NUMUNELERİN DEPOLANMASI ve DAĞITIMI

Hazırlanmış olan yeterlilik testi numuneleri Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsünde -20 °C'de muhafaza edilir. Bu numunelerin katılımcılara dağıtımı kargo ile aynı tarihte yapılır. Dağıtım ulusal veya uluslararası standartlarda belirtilen biyogüvenlik şartlarına uygun olarak sağlanacaktır.

Katılımcı, numunelerin içerisinde bulunduğu ambalajın teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça (ambalajın yırtık veya deforme olması, emniyet bandının olmaması ya da hasar görmesi vb.) ambalajın kabulünü ertelememeli, ambalaja ait evrak ve dokümanlarının tam olduğunu kontrol etmeli ve test materyalinin teslim alınması ile birlikte YT-F-406 Numune Takip Formu ile Enstitümüze bilgi vermelidir. Test materyalinin katılımcı tarafından teslim alınmasına engel durumlarda, Numune Takip Formu ile Enstitümüze bilgi verilmelidir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	5 / 10

9. TARAFSIZLIĞIN ve GİZLİLİĞİN SAĞLANMASI

Gizliliğin sağlanması amacıyla her bir katılımcıya bir laboratuvar kodu verilerek yeterlilik deney turu sürdürülecektir. Laboratuvara ait kod numarası kurumsal mail adresi ile katılımcıya gönderilecektir.

Yeterlilik deney programında laboratuvarlara ait bilgilerin muhafazası, sonuçların gizliliği ve değerlendirmenin tarafsızca gerçekleştirilmesi en önemli prensiptir. Bu nedenle laboratuvar personeli, ilgili kişiler ve üst yönetimden gizlilik ve tarafsızlık beyanı alınır.

Gizlilik ilkesi gereği sorumlular hariç Kurum personelinin laboratuvar isimlerine göre sonuçları görmesi engellenir. Bu amaçla sonuçların sadece Sonuç Bildirim Formunda belirtilen e – posta adresine ve kargo yolu ile Kuruma gönderilmesi gerekir.

Her “Yeterlilik Test Katılımcısına” farklı bir laboratuvar kodu verilir ve sadece katılımcının kendisi tarafından bilinir. Yeterlilik testi raporunda sonuçlar bu kod ile açıklanır. Katılımcının istemesi durumunda raporda sonuçlar kurum/kuruluş adı ile açıklanır.

Enstitümüz, düzenlenen yeterlilik testi katılımcılarından biri olduğunda gizliliği sağlamak amacıyla;

- YT test sonuçlarını ilk olarak kendisi verir,*
- Kamera sistemi ile numune hazırlama işlemleri kayıt altına alınır,*
- Her katılımcıya farklı numuneler gönderilir,*
- Numune paketlemek için YT laboratuvarına kartlı sistemle giriş yapılır,*
- Tur koordinatörleri numune hazırlayan teknik ekiple aynı laboratuvarda çalışmaz.*

tedbirler alınarak düzenlenen yeterlilik testinde gizlilik sağlanır.

Yeterlilik deney sonuçlarının yasal yetkiye sahip bir makam tarafından, yeterlilik deneyi düzenleyicisinden istenmesi durumunda, etkilenen katılımcılara bu durum yazılı olarak bildirilir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	6 / 10

Yasal otorite, müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez.

Yeterlilik Testi Sağlayıcısı, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur.

Katılımcı laboratuvarların birbiri ile ortak çalışmaması, tespit etmiş oldukları analiz sonuçlarını birbirleri ile paylaşmamaları gerekmektedir.

Katılımcı laboratuvarların birbiri ile ortak çalışması, analiz sonuçlarını teslim tarihinden önce birbiri ile paylaşmaları tarafımızdan fark edilebilecek hususlar değildir. Bu gibi durumlardan şikâyet söz konusu olduğunda ilgili yeterlilik testi programı komisyonunda bu durum değerlendirilerek katılımcıların sonuçları iptal edilir, ücretleri iade edilmez.

10. KATILIMCILARIN DENEYİNİ YAPACAĞI ANALİZLER

Katılımcılar kendilerine gönderilen EVKEM/26/PT013/1* kodlu yeterlilik deneyine ait numuneleri hangi analiz metodu ile yaptıklarını Analiz Sonuç Bildirim formunda belirtirler.

11. KATILIMCILARIN İHTİYAÇ DUYACAĞI YÖNTEM VEYA PROSEDÜRLER HAKKINDA BİLGİ

Gönderilen yeterlilik deney materyali; 2 ml hacimli vialler içerisinde bulunan embriyolu tavuk yumurtasından elde edilen 1 ml inaktif liyofilize Chorio Allantoik Sıvı (CAS)'dan Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) (Matrix (M), H5, H7, H9, N1 ve N8 Proteinlerinin nükleik asitleri Real Time PCR ile Tespiti yapılan) pozitif ve negatif numuneleridir.

Katılımcılara EVKEM/26/PT013/1* kodu ile gönderilen numuneler;

1 ml inaktive edilmiş olan liyofilize Chorio Allantoik Sıvı (CAS)'lardır. Katılımcıların EVKEM/26/PT013/1* kodu ile gönderilen liyofilize CAS 1 ml steril distile su ile sulandırmaları gerekmektedir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	7 / 10

Avian Influenza Hastalığı Virusunun (AIV) (Matrix (M), H5, H7, H9, N1 ve N8 proteini nükleik asidi Real Time RT-PCR ile tespiti işletme içi metoda göre gerçekleştirilir.

Biyolojik materyalle ve sağlığa zararlı biyolojik veya kimyasal maddeler ile çalışılırken dikkatli olunmalıdır. Bu konuda WOAİ Terrestrial Manual Chapter 1.1.4. Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities ve WHO Laboratory biosafety manual, 4th edition içeriğinde bulunan talimatlara uygun şekilde çalışılmalıdır.

12. UYGUN OLMAYAN ANALİZ SONUÇLARININ OLASI NEDENLERİ

12.1 Yeterlilik Test Materyali

a) Yeterlilik Test Materyalinin kontrolünün yapılmaması:

Teslim alınan test materyalinde ve/veya ambalajında hasar tespiti (dağıtım esnasında olası dökülme, kırılma, bulaşma vb. durumlar için) yapılması gerekmektedir.

b) Yeterlilik Test Materyalinin Teslim Edilmemesi:

Katılımcı laboratuvarların a ve b maddelerindeki olumsuzlukların tespiti halinde elektronik posta ile katılımcılara gönderilen YT-F-406 Numune Takip Formu gerekçeleriyle birlikte doldurularak geri bildirim yapmaları gerekmektedir.

12.2 Numune Hazırlama

a) Hazırlama talimatına uyulmaması:

Her YT materyali için katılımcılara gönderilen Katılımcı Bilgilendirme Talimatı'na uyulması gerekmektedir.

b) Etiket bilgilerinin karıştırılması:

Analiz sırasında analiz yapan personel tarafından etiket bilgilerinin hatalı olarak sıralanması sonuçların yanlış bildirilmesine neden olabilir.

c) Çapraz bulaşma:

Gönderilen Yeterlilik Test Materyali'nin ayrı çalışılması olası kontaminasyonu önler.

12.3 Materyaller

Kimyasal, ayıraç, kit gibi analizi doğrudan etkileyen malzemelerin son kullanım



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	8 / 10

tarihleri sonuçları doğrudan etkilemektedir.

12.4 Ekipman

Analizi yaparken kullanılan pipet, santrifüj, vortex gibi cihazların kalibrasyonları ve performans kontrolleri sonuçları doğrudan etkilemektedir.

12.5 Metot ve Personel Yeterliliği

Ticari Kite ait metodun aşamalarına tam uyulmaması yanlış sonuçlara neden olabilir.

Analize ait validasyon çalışmalarının tamamlanmamış olması, olası hatalar için önem teşkil etmektedir. Personelin eğitimi ve yetkilendirilmesinde meydana gelen eksiklikler sonuçları doğrudan etkileyebilmektedir.

13 KATILIMCILAR TARAFINDAN KULLANILACAK ANALİZ SONUCU RAPOR FORMATI

Katılımcıların her birini analiz sonuçları yalnızca pozitif ve negatif olarak değerlendirilecektir.

Katılımcılar kurum web sayfasında yayınlanmış olan YT-F-402.13 Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile Tespiti Sonuç Bildirim Formu çıktısı alınıp imzalandıktan sonra öncelikle mail sonrasında ise resmi yazı ile ıslak imzalı veya elektronik imzalı şekilde kurumumuza göndereceklerdir.

14 SONUÇ RAPORU

TS EN ISO / IEC 17043 standardı kapsamında düzenlenecek olan raporlar, YT-F-408 Sonuç Raporu Formu, YT-P-405 Sonuçların Raporlanması Prosedürü'ne göre oluşturulur.

Katılımcıların performansının değerlendirilmesi pozitif ve negatif sonuçlara göre yapılır. Enstitümüz tarafından düzenlenecek olan YT çevrimlerinin tamamı kalitatif testler olup değerlendirme kalitatif YT çevrimleri maddesine göre raporlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ancak katılımcılar tarafından üst yazı veya mail ile örneğin Real Time PCR testlerinde CT değerleri Komplement Fiksasyon Testinde Titre hesaplamasına dayalı testlerde başvuruda sayısal olarak ta analiz hesaplanması talep edilirse tüm katılımcılardan CT ve Titre değerleri talep edilerek prosedüre göre raporlama işlemi yapılacaktır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	9 / 10

Raporlarda; yeterlilik testi programı hakkında detaylı bilgi, yeterlilik testinin amaçları, numuneye ait bilgiler, performans değerlendirmeleri, parametre bazında her katılımcının sonucunun yer aldığı laboratuvar kodu ile verilen tablolar yer almaktadır. Katılımcılara 27.02.2026 tarihinde imzalı rapor E- belgeden gönderilir. Sonuç raporu Enstitümüz resmi web sitesinde yer alan “Yeterlilik Testleri” sekmesinde yayınlanacaktır.

15 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından düzenlenen yeterlilik testi programlarının sonunda katılımcıların performanslarının değerlendirilmesinde önceden belirlenen atanmış değer kullanılır.

16 YETERLİLİK DENEY NUMUNELERİNİN KAYBOLMASI VEYA HASAR GÖRMESİ

Yeterlilik testi numuneleri dağıtılmak üzere kargoya verildikten sonra, katılımcılardan numuneleri teslim aldıklarına ilişkin teyit bildirisini, mail aracılığı ile gönderilen Numune Takip Formu aracılığı ile numune ellerine geçtikten sonra 5 iş günü içerisinde e-posta yoluyla iletmeleri talep edilir. Bu süre içerisinde bildirimde bulunmayan katılımcıların numuneyi aldıkları varsayılır.

Yeterlilik testi numunelerinin kargoyla taşınması sırasında oluşabilecek herhangi bir dökülme, kırılma, akma gibi nedenden dolayı katılımcıların eline kullanımı mümkün olmayan numuneler geçtiğinde, katılımcıların bu duruma itirazlarını kargo ellerine geçer geçmez 3 gün içerisinde Numune Takip Formu aracılığı ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne bildirmeleri beklenir. Bildirim için bu 3 günlük süre aşıldığı takdirde, katılımcılara yeni numune gönderilmez.

Numuneler teslim alındıktan sonra, katılımcılar tarafından kullanılmaları esnasında dökülme, kırılma gibi nedenlerden dolayı zarar gördüğünde yeni numune alabilirler. Bu gibi durumlarda test sonuçlarının teslim tarihlerinde uzatma yapılmaz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile
Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatı

Doküman No	YT-T-404.13
İlk Yayın Tarihi	03.01.2022
Revizyon Tarihi	24.06.2025
Revizyon No	01
Sayfa No	10 / 10

17 SÖZLEŞME

Bu katılımcı bilgilendirme talimatı katılımcı ile yapılan sözleşme niteliğindedir. Katılımcılar, Yeterlilik Test Sonuçlarını ilan edilmesinden itibaren 5 iş gününe kadar itiraz etmediği takdirde talimatta belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

*AB-0024-YT dosya numarası ile akredite olan Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait **TÜRKAK akreditasyon markası**, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve taşeronlarımız dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafça yetkisiz bir şekilde kullanılamaz.*