



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

1/1

GENETİK LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

Numune tercih sırası: İlgili test için +: en az, ++: orta, +++: en çok tercih edilmesi gereken numunedir.

* Laboratuvarımıza DNA analizi için at, sığır ve koyunlardan kan, kıl ve sperma örnekleri gönderilecektir.

Numune saklama ve gönderme: Tüm numuneler buzdolabı koşullarında (4°C) muhafaza edilerek; kanlar EDTA'lı ya da Lityum Heparin'li tüplerde, kıllar köklü olarak en az 25-30 adet boş ve steril tüp ya da zarf içerisinde, dondurulmuş spermalar tohumlama payetlerinde, taze sperma da steril tüp içerisinde gönderilmelidir.

Test Adı/ Test Tipi/ Tür	Numune Tipi		
	Antikoagulanlı Kan (EDTA ya da Lityum Heparin)	Kıl (Köklü)	Sperma
DNA-STR/ Mikrosatellite Analizi / <i>At</i>	+++	++	++
DNA-STR/ Mikrosatellite Analizi / <i>Sığır</i>	++	+	+++
DNA-STR/ Mikrosatellite Analizi / <i>Koyun</i>	+++	+	+++