



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Tp.Sayfa:

1/1

KUDUZ TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

Numune tercih sırası: İlgili test için +: en az, ++: orta, +++: en çok tercih edilmesi gereken numunedir.

* FAT, PCR, RTCIT testleri için gönderilecek **Beyin- Beyincik** miktarı en az **10 g** olmalıdır. **Kadavra** numuneleri sadece kedi, küçük köpek ırkları ve ağırlığı 5 kg geçmeyen küçük vücutlu hayvanlar için geçerlidir. Çift -Tek tırnaklı havanlar için kadavra numunesi kabul **edilememektedir**. Bu hayvanlarda kafa ya da beyin-beyincik numunesi soğuk zincirde gönderilmelidir.

*FAVN testi için en az 2 ml **Serum** soğuk zincirde gönderilmelidir. (Kan, boş kan tüplerine alınıp, serumu ayrıldıktan sonra, serum eppendorf tüpe aktarılarak gönderilmelidir.)

*Numune saklama ve gönderme: Tüm numuneler kapaklı, steril, sızdırmaz kaplarda buzdolabı koşullarında (4°C) saklanarak, soğuk zinciri kırılmayacak şekilde(Isı geçirmeyen strafor kutular içinde buz aküleri ile birlikte) gönderilmelidir. Numune kabına numune dışında kesinlikle **FTS, formol, alkol vb. hiç bir kimyasal eklenmemelidir.**

Hastalık Adı / Test Yöntemi	Numune Tipi			
	Beyin- Beyincik	Kafa	Kadavra	Kan Serumu
Kuduz Hastalığı				
Kuduz - FAT (Floraslan Antikor Testi)	+++	++	+	
Kuduz - Real Time RT-PCR	+++	++	+	
Kuduz - RT - PCR	+++	++	+	
Kuduz - RTCIT (Kuduz Doku Kültürü Enfeksiyon Testi)	+++	++	+	
Kuduz - FAVN (Floraslan Antikor Virus Nötralisasyon) Testi				+++