



T.C.  
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI  
MERKEZ VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA  
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  
ETLİK - ANKARA

## ETLİK İNTRADERMİK SAUTON MALLEİN PROSPEKTÜSÜ

### Kompozisyonu

İntradermik Sauton Mallein,  
Burkholderia mallei'nin 3 ayrı lokal  
suşundan hazırlanmaktadır.

### Kullanım alanı

Tek tırnaklılarda ruam hastalığının  
teşhisinde kullanılır.

### Uygulama ve Dozaj

Tektırnaklılarda boynun orta üçte  
birine 0.2 ml intradermik olarak  
uygulanır.

### Değerlendirme

Sonuçlar 72 saat sonra Ruam Savaş  
Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.

### Kontrendikasyonları

Yoktur.

### Uyarılar

Antijen her yaştaki tektırnaklılara  
uygulanabilir. Test en az 21 gün  
sonra tekrarlanabilir. Test edilen  
hayvanlarda diğer serolojik tanı  
testleri 2 ay sonra uygulanmalıdır.

Kısmen kullanılmış şişelerde kalan  
malleinler kullanılmamalıdır.

### İmha koşulları

Kullanılmayan antijenler tıbbi atık  
kategorisinde imha edilmelidir.

### Saklama koşulları

Antijen 5±3°C'de ve karanlıkta  
saklanmalıdır.

### Ambalaj şekli

2 ml şişelerde 10 doz

6 ml şişelerde 30 doz

**"SADECE VETERİNER KULLANIM  
İÇİNDİR."**

**Üretici kurum:** Etlik Merkez  
Veteriner Kontrol ve Araştırma  
Enstitüsü/ANKARA