



T.C.
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
MERKEZ VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ETLİK - ANKARA

ETLİK BOVİNE TÜBERKÜLİN PPD PROSPEKTÜSÜ

Kompozisyonu

Bovine tüberkülin PPD *M.bovis*'in AN/5 suşundan hazırlanmaktadır. Aktif protein miktarı ml de 1 mg'dır.

Kullanım alanı

Sığır tüberkülozunun teşhisinde kullanılır.

Uygulama ve Dozaj

6 haftalıktan büyük her yaştaki sığıra uygulanabilir. Sığırlarda boynun orta üçte birinde belirlenen bölgeye 0.1 ml intradermik olarak uygulanır.

Değerlendirme

Sonuçlar 72 saat (± 4 saat) sonra 02.04.2009 tarihli 'Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.

Kontrendikasyonları

Paratüberküloz aşısı uygulanan hayvanlar bovine tüberküline karşı kuvvetli reaktördür; bu nedenle bu tip sürülerde tüberkülin uygulanması kontrendikedir.

Uyarılar

Test en az 42 gün sonra tekrarlanabilir. Kısmen kullanılmış şişelerde kalan tüberkülinler kullanılmamalıdır.

İmha koşulları

Kullanılmayan antijenler tıbbi atık kategorisinde imha edilmelidir.

Saklama Koşulları

Antijen 5 ± 3 °C'de ve karanlıkta saklanmalıdır.

Ambalaj Şekli

1 ml şişelerde 10 doz
3 ml şişelerde 30 doz
5 ml şişelerde 50 doz

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR."

Üretici kurum: Etlik Merkez
Veteriner Kontrol ve Araştırma
Enstitüsü/ANKARA