



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

1/3

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

İç organ numunelerinde hastalık semptomlarının görüldüğü sisteme ait numune gönderilmelidir. Örneğin, sindirim sistemini etkileyen bir hastalık var ise bağırsak numunesi (bazı durumlarda mide ile birlikte), solunum sistemini etkileyen bir hastalık var ise parazitlerin gelişim evrelerinin görülebileceği bağırsağın yanında hastalık semptomlarının görüldüğü akciğer numunesi de gönderilmelidir. Gaita gönderilecekse toprakla kontamine olmadan alınarak gönderilmelidir. Sistemik hastalıklar veya hastalık sebebinin bilinmediği durumlarda akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak gibi organlar birlikte gönderilebilir. Laboratuvarımızda sığır, koyun-keçi gibi ruminantların kan protozoonlarının teşhisi tam kandan yapılmakta olup kan serumlarından teşhis yapılamamaktadır (eğer kan ulaştırılamıyorsa dalak veya karaciğer dokuları gönderilebilir). Preputial / Vaginal yıkantıların alınma tarihi ve saati numune üzerine yazılmalı ve zaman kaybetmeden 24 saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.

Organ numuneleri buzdolabı koşullarında (4°C) saklanarak, herhangi bir kimyasal eklenmeden (FTS, formol, alkol vb.) mümkün olan en kısa sürede soğuk zincirde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

2/3

Test Adı / Test Yöntemi

Numune Tipi

Tek Tırnaklı Hastalıkları

Dourine (*Trypanosoma equiperdum*) / CFT

Kan serumu

***Babesia caballi* ve *Babesia (Theileria) equi* / c-ELISA**

Kan serumu

***Babesia caballi* ve *Babesia (Theileria) equi* / IFAT**

Kan serumu

Sığır Hastalıkları

Kan serumu

Tritrichomonas foetus* / Kültür

Preputial / Vaginal Yıkantı

*** Yıkantılar Laktatlı Ringer Solüsyonu ile alınmalıdır.**

Koyun Ve Keçi Hastalıkları

Toksoplazmosis / c-ELISA

Kan serumu

Kedi ve Köpek Hastalıkları

Canine Leishmaniasis / IFAT

Kan serumu

***Ehrlichia canis* / IFAT**

Kan serumu



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

3/3

Diğer Paraziter Hastalıklar (Tüm Memeliler)

Gaita Ve Organda Natif Muayene

İç organ örnekleri, gaita

Organ Muayenesi ve Helmintlerin İdentifikasyonu

İç organ örnekleri, gaita

Organ Muayenesi ve Protozoonların İdentifikasyonu

İç organ örnekleri, gaita

Oocyste Sporlandırılması ve İdentifikasyonu

İçerikli bağırsak veya gaita

Protozoonların Fikzasyonu, Boyanması ve İdentifikasyonu

Antikoagülanlı kan, kan frotisi veya organ frotisi

Trichinella Teşhisi

Kas dokusu

Artropod Cins / Tür Tanımlaması

Bütünlüğü bozulmamış Artropod

Uyuz Muayenesi**

Deri kazıntısı, lezyonlu bölgeden kıl folikülü

Bahırların Paraziter Hastalıkları

Parazitolojik Muayene

Tüm Balık