


	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. DOP
		Yayın Tarihi:	15.07.2004
		Rev.Tarihi/No:	10.11.2023/12
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/3
1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı ve kapsamı, numune kabulü, dağıtımı ve muhafazası prosedüründe belirtilmiştir. 2. SORUMLULAR Bu talimatın sorumluları numune kabulü, dağıtımı ve muhafazası prosedüründe belirtilmiştir. 3. UYGULAMALAR 3.1. Deney Numunesi Kabul İşlemleri 1-VKMAE Müdürlüğü Doping Laboratuvarına gizli şifre tutanaklı yazı ile gelen numuneler, numune kabul şefliği tarafından kontrol edilir. Bu kontrol sırasında idrar ve kan numunelerinin bulunduğu koli açılmaz. Sadece görevli personelce kolide herhangi bir kırık, sızıntı, yırtık gibi benzeri şekilde uygunsuzluk olup olmadığı tespit edilir ve Numune Kabul Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü çerçevesinde laboratuvara sevk edilir. 2-Uzman heyet huzurunda açılan koli içindeki gizli şifre tutanağında belirtilen sayıda idrar ve kan numunesinin varlığı kolide incelenir ve şifre numaraları kontrol edilir. Herhangi bir tutarsızlık veya numunelere ait bir uygunsuzluk Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığına bir yazı ekinde tutanakla bildirilir. Gönderilen idrar numuneleri tek kullanımlık polietilen kaplarda şifre numaralı ve kilitli kapaklı, kan numuneleri ise heparinli ve vakumlu tüplerde olmalıdır. 3-Merkez Doping Laboratuvarına gelen numunelerin laboratuvara sevki teknik müdür muavini tarafından yapılır. 3.2. Deney Numunelerinin Üzerinde Merkez Doping Laboratuvarının Yapılacağı İşlemler 1-Laboratuvara intikal eden numuneler laboratuvar analiz metotlarına göre hazırlanır. 2-Sevk formundaki bilgiler analiz defterine kayıt edilir, bu deftere yapılacak analizlerde yazılır. 3-Hazırlanan numuneler laboratuvar analiz metotlarına göre analiz edilir. 4-Analiz sonuçları muayene defterine kayıt edilir. Analiz ile ilgili bilgisayar çıktısı mevcut ise rapora iliştilir. Sonuçlandırılan raporlar, Uzman heyet ve/veya Karma Mütihassıs heyet tarafından kontrol edilerek imza edilir. Analiz cihaz çıktıları laboratuvarda kalan ve muhafaza edilen rapor ve şifre tutanaklarına eklenir. 3.3. Analizi Biten Numuneye Uygulanacak İşlemler Numunelerin laboratuvara geldiği tarihten itibaren analiz süresi ortalama 5-6 gündür. Analize alınan numuneler, muayene raporlarının yazımına kadar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Analizi biten pozitif numuneler -16°C/-22°C de derin			
Hazırlayan DOPİNG LAB. SORUMLUSU	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan ENSTİTÜ MÜDÜRÜ	



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. DOP
Yayın Tarihi:	15.07.2004
Rev.Tarihi/No:	10.11.2023/12
Sayfa/Tp.Sayfa:	2/3

dondurucuda 6 ay, negatif numuneler +2/+8°C de 1 ay süreyle muhafaza edildikten sonra Atık Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde imha edilir.

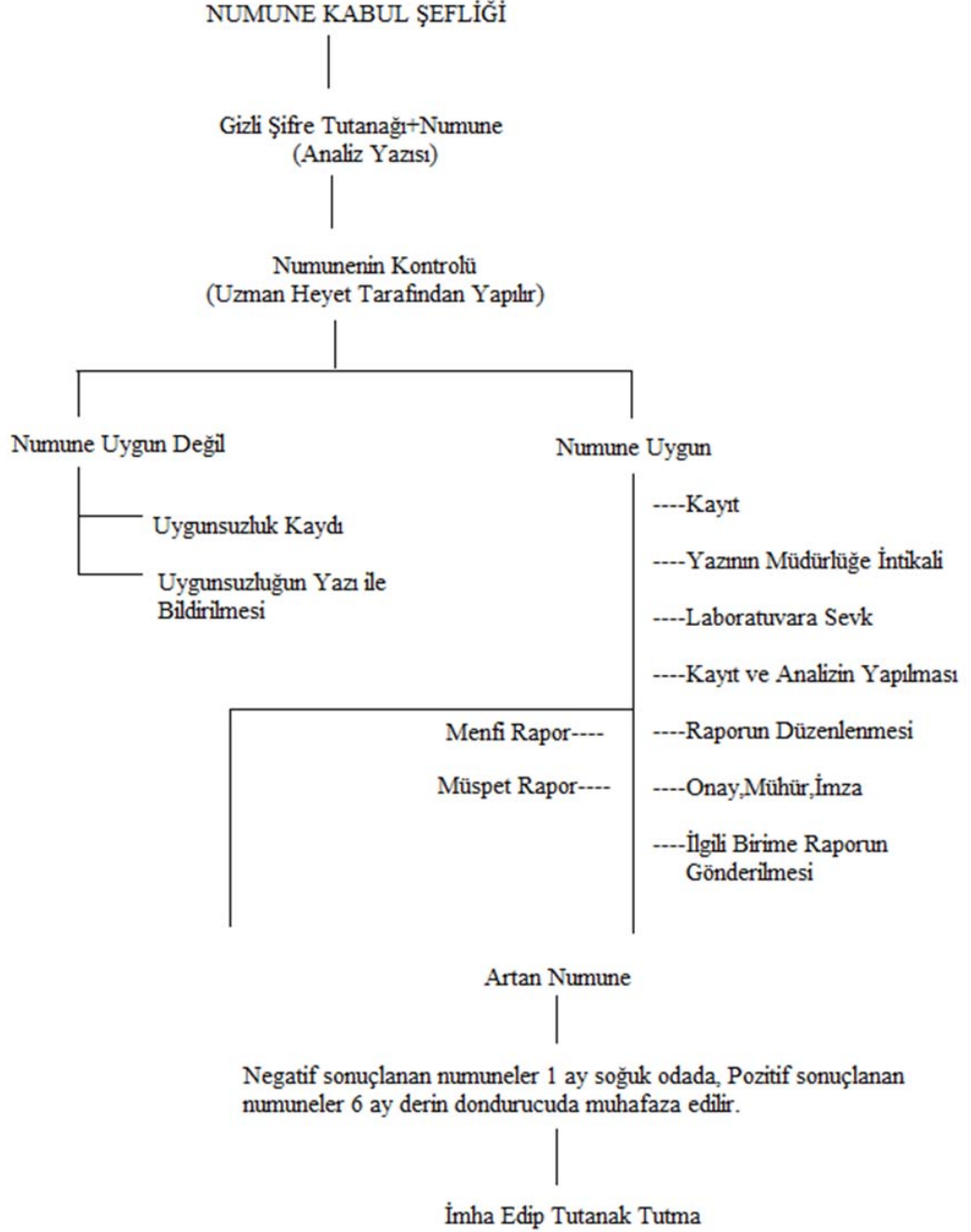

Hazırlayan
DOPİNG LAB. SORUMLUSU

Kontrol Eden
KYBS

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. DOP
		Yayın Tarihi:	15.07.2004
		Rev.Tarihi/No:	10.11.2023/12
		Sayfa/Toplam Sayfa:	3/3

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

VKMAE Pr.03 Kalite Kayıtlarının Kontrolü ve Arşiv Prosedürü
VKMAE Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtım ve Muhafazası Prosedürü
VKMAE Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

5. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kalite Kayıtlarının Kontrolü ve Arşiv Prosedürü (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyalarının birisi ilgili laboratuvarıda diğeri ise Numune Kabul Şefliğinde bulunur.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	24.02.2005	1-2	Çıkartma ve ekleme
02	03.12.2008	3.3-6	Çıkartma ve ekleme
03	26.03.2009	3.3	Çizili Kıs. Çıkarılması
04	12.07.2010	3.3	Raporlama süresinin eklenmesi. Negatif numunelerin saklanması 1 ay olarak değiştirilmesi
05	15.02.2012	Genel	639 sayılı KHK gereği dökümanlarda değişiklik yapılması
06	01.05.2013	Genel	Güncelleme
07	01.03.2014	Genel	Güncelleme, logo değişikliği
08	25.05.2015	Genel	Cihaz çıktılarının eklenmesi
09	15.11.2019	Genel	Güncelleme, logo değişikliği
10	07.10.2022	Genel	Güncelleme
11	21.10.2022	Genel	Güncelleme
12	10.11.2023	Genel	Güncelleme

Hazırlayan DOPİNG LAB. SORUMLUSU	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------