

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.KDT
		Yayın Tarihi:	14.07.2004
		Rev.Tarihi/No:	22.05.2024/10
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı ve kapsamı Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedüründe VKMAE Pr.09.) belirtilmiştir.

2. SORUMLULUKLAR

İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedüründe (VKMAE Pr.09.) tanımlanmıştır.

3. UYGULAMALAR

Kuduz Teşhis Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP'larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

Teşhis ve kontrol amacı ile gelen materyale ait ambalajlı kolinin (kokuşma nedeni ile muayenesi istenen materyal dahil) soğuk zincir şartlarına uyup uymadığı kontrol edilmeli, uygun olanlar kabul edilmelidir. Koli içeriği sızdırmaz nitelikte olmalıdır. İçerisinde yeteri miktarda kapalı devre buz aküsü bulunmalıdır. Tuzlanmış, formol içerisine konulmuş, dökülmüş vs. işlem görmüş materyal kabul edilmez.

3.1. Beyin Numunesi: Teşhis ve kontrol amacı ile şartlar uygun olduğu takdirde kuduz şüpheli bir hayvana ait kafatası açıldıktan sonra beyin yarısı sızdırmaz kap içerisinde alınmalıdır. Eğer bu mümkün değilse kafa bütün olarak sızdırmaz kap içerisine konulmalıdır (kedi, küçük köpek, gelincik vs. gibi küçük hayvanlar bütün olarak gönderilebilir). En kısa sürede soğuk zincir şartlarına uygun olarak gönderilmelidir.

3.2. Serum Numunesi: Serolojik olarak antikor titre tespiti için en az 1 ml serum numunesi gereklidir. Serum Numunesi Numune Kabul ve Raporlama Birimine soğuk zincir şartlarına uygun şekilde kargo ile gönderilebilir veya kişiler tarafından şahsen elden getirilebilir. Tam Kan numunesi hemoliz nedeniyle testi etkilediğinden kabul edilmez. Gönderilecek serum numuneleri plastik tüplerde (ependorf , vida kapaklı 1.5 ml lik tüpler) gönderilmelidir. Enjektör gibi farklı saklama şartlarında gönderilen serumlar ve tam kan kabul edilmez.

3.2.1. Serum Numunesi : Antikor titre tespiti için kargo ile gönderilen serum tüpleri numune kabul bölümünde Numune Kabulü Talimatına göre (VKMAE.Pr.09) teslim alınarak Kuduz Teşhis laboratuvarına teslim edilir.

Çalışma saatleri dışında kabul edilen numuneler +4° C buzdolabında çalışma saatinin başlamasına kadar saklanır. Çalışma saatinin başlamasında Kuduz Teşhis Laboratuvarına teslim edilir.

3.3. Aşı Numunesi : Zararsızlık ve sterilite yönünden kontrol amacı ile gelen ve kabul edilen ithal aşılar, çalışma saatleri içerisinde numune kabul bölümünde teslim alınarak, Kuduz Teşhis Laboratuvarına teslim edilir. Çalışma saatleri dışında kabul edilen numuneler +4° C buzdolabında çalışma saatinin başlamasına kadar saklanır. Çalışma saatinin başlamasını takiben Kuduz Teşhis Laboratuvarına teslim edilir.

(Handwritten signature)

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.KDT
		Yayın Tarihi:	14.07.2004
		Rev.Tarihi/No:	22.05.2024/10
		Sayfa/Tp.Sayfa:	2/3

3.4. Yarasa ve yarasa gübresi : Teşhis ve kontrol amacı ile en kısa sürede soğuk zincir şartlarına uygun olarak sızdırmaz kap içerisinde konularak gönderilmelidir. Yarasa bütün olarak gönderilmelidir.

3.5. İnsanlardan kuduz teşhisi ve/veya kuduz antikor titre tayini için alınıp gönderilen numunelerin kabulü, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Kuduz Profeksi Rehberi'nde belirtilen şartlara göre yapılmalıdır.

Çalışma saatleri içerisinde gelen ve uygun şartlarda kabul edilen materyaller numune kabul bölümünde teslim alınarak, Kuduz Teşhis laboratuvarına teslim edilir.

Çalışma saatleri dışında gelen ve uygun şartlarda kabul edilen materyaller soğuk zincirde muhafaza edilerek, en kısa sürede Kuduz Teşhis Laboratuvarı'na bilgi verilir ve laboratuvara teslim edilmesi sağlanır.

FAVN analizi için Enstitü Müdürlüğümüze gönderilen numunelerin Numune Kabul ve Raporlama Birimince kabulü Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı hükümlerine göre yapılmalıdır. Velbis protokolü üzerinden protokol oluşturularak başvurusu yapılmış ve uygun bulunan numuneler Numune Kabul ve Raporlama Birimince kabul edilerek Velbis Sistemi üzerinden işleme alınır. Her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır.

Enstitüye kuduz hastalığı teşhisi için getirilen /gönderilen kafa (köpek, kedi, sığır, vahşi yaşam) ile tüm kadavra (köpek, kedi, vahşi yaşam) materyalleri Numune Kabul ve Raporlama Biriminden otopsi odasına orijinal ambalajı içinde gönderilir. Otopsi salonunda Patoloji Laboratuvarı personeli tarafından yeterli miktarda ayrılan materyal Kuduz Teşhis laboratuvarına gönderilir. Birden fazla hastalık yönünden muayenesi istenen materyal Patoloji Laboratuvarının ilgili talimatına göre işlem görür.

Çalışma saatleri içerisinde gelen ve uygun şartlarda kabul edilen sadece beyin materyali, numune kabul bölümünde teslim alınarak, Kuduz Teşhis laboratuvarına teslim edilir.

Çalışma saatleri dışında gelen ve uygun şartlarda kabul edilen sadece beyin materyali -20°C derin dondurucuda çalışma saatinin başlamasına kadar saklanır. Çalışma saatinin başlamasını takiben Kuduz Teşhis Laboratuvarına teslim edilir.

Çalışma saatleri dışında gelen ve birden fazla hastalık yönünden muayene istenen materyal Patoloji Laboratuvarının ilgili talimatına göre işlem görür.

Analize alınan numuneler, muayene raporlarının yazımına kadar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürüne (VKMAE Pr.09) göre muhafaza edilecektir.

Numuneler analiz /test bitiminde, derin dondurucularda 30 gün süreyle muhafaza edildikten sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler.