

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.PAR
		Yayın Tarihi:	20.05.2004
		Rev.Tarihi/No:	11.02.2025/10
		Sayfa/Toplam Sayfa:	1/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı ve kapsamı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde belirtilmiştir.

2. SORUMLULUKLAR

İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde tanımlanmıştır.

3. UYGULAMALAR

Parazitoloji Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP' larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

3.1. Doku ve Organlar: Post mortem olarak nekropsisi yapılmış hayvanların çeşitli iç organ ve doku örnekleri hiçbir işleme tabi tutulmadan laboratuvara ağzı sıkıca bağlanmış plastik torbalar içinde, en kısa sürede (en geç 24 saat içerisinde) ve soğuk zincirde,

- Sadece bağırsak gönderilecekse; iki ucundan bağlanarak, içeriğin akmasına izin verilmeksizin plastik poşet içerisinde 24 saat içerisinde ve soğuk zincirde,

3.2. Gaita: 5-10 gr. taze gaita örneği temiz bir kap içerisinde (hiçbir işleme tabi tutulmaksızın) 24 saat içinde ve soğuk zincirde,

- Kanatlı hayvanların gaita muayenelerinde, kümesin çeşitli yerlerinden alınan gaitalar temiz bir kaptan, 24 saat içerisinde ve soğuk zincirde,

3.3. Kan ve kan serumu: Kan örnekleri antikoagülanlı (EDTA, heparin vb.) tüpler içerisinde, 10 ml olacak şekilde ve soğuk zincirde,

Kan serumu örnekleri de vakumlu steril tüplerde veya ependorf tüplere ayrılmış vaziyette hemolizsiz ve en az 2 ml olacak şekilde, soğuk zincirde,

3.4.Kan / Doku frotisi: Temiz lam üzerine perifer kandan veya dokudan ince yayma / tuşe frotiler yapılarak tespit edilmeden ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan temiz havada kurutularak en kısa sürede ve kapalı bir muhafaza içerisinde,

3.5. Preputial / Vaginal Yıkantı: *Tritrichomonas foetus* yönünden muayenesi istenilen yıkantılar Laktatlı Ringer solüsyonu içerisinde ve en geç 24 saat içerisinde, alındığı gün ve saat mutlaka belirtilerek,

Hazırlayan Parazitoloji Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
---	----------------------	-----------------------------

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.PAR
		Yayın Tarihi:	20.05.2004
		Rev.Tarihi/No:	11.02.2025/10
		Sayfa/Tp.Sayfa:	2/3

3.6. Deri Kazıntısı: Lezyonlu bölgelerden derin bir şekilde alınmış olan kazıntı ve/veya foliküllü kıl örneği en kısa sürede temiz ve ağzı kapalı bir kap içerisinde,

3.7. Artropodlar: Toplanmış parazitler (kene, bit, pire, uyuz etkenleri, myiasis etkenleri vb.) en kısa sürede iyi bir anamnez ile birlikte hiçbir muameleye tabi tutulmadan veya %70'lik alkol içerisinde,

3.8. Balık Numunesi: Balıklar (canlı veya ölü), içinde kendi ortamının suyu bulunan ağzı sıkıca kapalı plastik torbalar içerisinde, en kısa sürede ve soğuk zincirde laboratuvara gönderilmiş olmalıdır.

3.9. Arı Numunesi: *Hastalıklı koloniden en az 300 adet kadar ergin arı (tercihen alındığında canlı), ağzı kapalı temiz bir kavanoz içerisinde ve en kısa sürede,*

3.10. Petek Numunesi: *Petek örnekleri kuluçka çerçevesinden 200 kapalı arı gözü içerecek boyutlarda yaklaşık 20x20 cm ebatında tahta / strafor kutu içerisinde ve en kısa sürede gönderilmiş olmalıdır (Daha fazla hassasiyet için 4 farklı çerçeveden 50'şer kapalı arı gözü içerecek parçalarda seçilebilir).*

NOT: Arı Hastalıkları yönünden muayene için gönderilen materyaller, Numune Kabul ve Raporlama Birimi'nden orijinal ambalajı içinde laboratuvara gönderilir. Laboratuvara getirilen/gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır. Parazitoloji Laboratuvarına getirilen/gönderilen doku-organlar, gaita, kan, preputial/vaginal yıkantı, deri kazıntısı, balık, **arı**, **petek** vb. numuneler muayene bitiminde, bu doku ve organlardan hazırlanan (tespit edilmiş/boyanmış) preparatlar, % 70' lik alkol içerisinde ya da uygun bir saklama solüsyonu içerisinde korunabilenler (artropod, helmint vb.) ile kan serumları gibi daha uzun süre muhafaza edilmesi mümkün olan numuneler rapor sonucunun gönderilmesinden 5 gün sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler. İmha edilene kadar kan serumları derin dondurucuda (-18°C ile -30°C arası), kalıcı preparat haline getirilenler ve alkol içine alınan numuneler ise oda ısısında muhafaza edilirler.

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER

VKMAE. Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE. Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE . Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

5.KAYIT KONTROL

Hazırlayan Parazitoloji Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
---	----------------------	-----------------------------

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.PAR
		Yayın Tarihi:	20.05.2004
		Rev.Tarihi/No:	11.02.2025/10
		Sayfa/Top.Sayfa:	3/3

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE. Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali Kalite **Yönetim** Biriminde, kontrollü kopyaları ise Parazitoloji Laboratuvarında ve Numune Kabul ve Raporlama **Biriminde** bulunur.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	21.02.2005	1,2	Düzeltilme
02	02.12.2008	3.8. ve 6.	Numunelerin saklama sürelerinde ve dağıtımda revizyon
03	16.04.2009	Genel	EMVKA Pr.01' e göre güncelleme
04	14.02.2012	Genel	Enstitü isminde yapılan değişiklik nedeniyle doküman kodlarının değişmesi
05	30.04.2013	3.	Numunelerin imha edilinceye kadar saklama koşullarının eklenmesi
06	31.01.2014	Tüm doküman	Logo değişikliği
07	18.02.2015	-	Lab. Şefi değişikliği
08	03.02.2020	Tüm doküman	Bakanlık logosunun güncellenmesi
09	01.03.2021	-	Lab. Şefi değişikliği
10	11.02.2025	-	Lab. Sorumlusu değişikliği ve "6. Dağıtım" maddesinde düzeltme, Arı Hastalıkları laboratuvarının kaldırılıp analizlerinin parazitoloji Laboratuvarına aktarılması nedeniyle talimatları birleştirilmiştir.

Hazırlayan Parazitoloji Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
---	----------------------	-----------------------------