

	PATOLOJİ LABORAVUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. PAT
		Yayın Tarihi:	20.05.2004
		Rev.Tarihi/No:	14.08.2025/08
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/3
1.AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedüründe (VKMAE Pr. 09) belirtilmiştir. 2.SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası prosedüründe (VKMAE Pr.09) belirtilmiştir. 3.UYGULAMALAR 3.1 Patoloji Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP'larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır. 3.2. Koli içeriği sızdırmaz nitelikte olmalıdır. Üzerinde numuneye ait bilgilerin varlığı kontrol edilir. 3.3. Gelen materyale ait ambalajlı kolinin soğuk zincir şartlarına uyup uymadığı kontrol edilir, uygun olanlar kabul edilir. Numune formol içerisinde gönderildiyse soğuk zincir aranmaz. 3.4. Velbis protokolü veya Numune Kabul Formu doldurulmuş iç organ örnekleri veya Kadavra gönderilmelidir. Agoni halde veya hasta olarak getirilen çiftlik hayvanları kesilmek suretiyle teslim alınır. 3.5. Gönderilen materyalde kokuşma belirtileri varsa histopatolojik muayeneye alınmaz. Makroskobik değerlendirme yapıp, gerek görülen analizler için ilgili laboratuvarlara dağıtımı yapılır. 3.6. Gönderilen materyalden sadece histopatolojik muayene talep ediliyorsa; lezyonlu ve sağlam dokuyu birlikte içerecek şekilde, hacminin 10 katı kadar %10'luk formaldehit solüsyonunda, normal şartlarda gönderilebilir. Bu materyallere ait tanımlama ve işaretlemeler hazırlanan evrak ile uyumlu olmalıdır. Farklı hayvanlara veya gruplara ait numuneler ayrı kaplarda gönderilmelidir. 3.7. Nekropsisi yapılmış hayvanlardan alınan iç organ örnekleri gönderilecekse; detaylı nekropsi raporu ile birlikte tercihen organın tamamını ya da lezyonlu ve sağlam alanı birlikte gönderilmelidir. Şüphe edilen hastalığa ait bulguların görülebileceği spesifik organ ve dokulardan birlikte örnekleme yapılmalıdır.			
Hazırlayan Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan ENSTİTÜ MÜDÜRÜ	

	PATOLOJİ LABORAVUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05. PAT
		Yayın Tarihi:	20.05.2004
		Rev.Tarihi/No:	14.08.2025/08
		Sayfa/Toplam Sayfa:	2/3

- 3.8. Dondurulmuş materyaller histopatolojik muayeneye alınamaz.
- 3.9. Gönderilen kadavradaki tanımlama (küpe numarası veya çip, ırk, renk, cinsiyet vb. özellikler) numune ile birlikte gönderilen resmi evrakta belirtilmelidir.
- 3.10. Muayene amacıyla gönderilen materyaller mesai saatleri haricinde geldiğinde +4 °C’de saklanır.
- 3.11. Çok zorunlu olmayan haller dışında, numunelerin bozulmaması için materyalin tatil günlerinde laboratuvarında olmasından kaçınılmalıdır. Kargoya verilirken laboratuvara ulaşma süresi hesaplanmalıdır.
- 3.12. Patoloji laboratuvarında %10 formol içerisinde bekletilen numuneler trimleme işleminden sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler. Bloklanan doku örnekleri ise 5 (BEŞ) yıl süre ile muhafaza edildikten sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler.
- 3.13. Analize alınan numuneler, muayene raporlarının yazımına kadar Numune Kabulü, Dağıtım ve Muhafazası Prosedürüne (VKMAE Pr.09) göre muhafaza edilecektir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER:

VKMAE Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtım ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

11. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

11. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyalarından biri Numune Kabul Biriminde diğeri ise Patoloji Laboratuvarında bulunmaktadır.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
-------------	-------	---------------------------	-----------------

Hazırlayan Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
------------------------------	----------------------	-----------------------------



PATOLOJİ LABORAVUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
T.05. PAT

Yayın Tarihi:

20.05.2004

Rev.Tarihi/No:

14.08.2025/08

Sayfa/Tp.Sayfa:

3/3

01	23.02.2005	1.,2. Ve 3.3.	Bilgi tekrarından kaçınılması ve bağlı prosedürle ilişkilendirilmesi, meydana gelecek değişikliklerin takibi ve güncelleme yapılması, hatalı numune kabulünün önlenmesi.
02	15.12.2008	6	Düzeltilme
03	27.03.2009	6	Güncelleme
04	23.06.2010	3,5	Güncelleme
05	20.02.2012	Genel	Güncelleme
06	24.02.2014	Bütün doküman	Logo değişikliği
07	11.03.2022	Genel	Güncelleme
08	14.08.2025	Bütün doküman	Dökümanın tamamında sadeleştirme ve güncellemeler yapılmıştır.

Hazırlayan
Lab. Sorumlusu

Kontrol Eden
KYBS

Onaylayan
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ