

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE.T.05. <i>SPI</i>
		Yayın Tarihi:	03.01.2006
		Rev.Tarihi/No:	18.03.2025/11
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı ve kapsamı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde belirtilmiştir.

2. SORUMLULUKLAR

İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü'nde (VKMAE.Pr.09) tanımlanmıştır.

3. UYGULAMALAR

Spiroket Hastalıkları Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP'da ve ilgili talimatlar da belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

3.1.SEROLOJİK TESTLER İÇİN

Kan serumu: Leptospirozis ile ilgili klinik ve epidemiyolojik veriler var ise ve hastalık belirtilerinin üzerinden 10 günden daha fazla zaman geçmiş veya kaç gün olduğu bilinmiyorsa vakumlu tüp içinde veya kan pıhtılaştıktan sonra serumu steril endorff içinde, hemolizsiz, 1-2 ml. olacak şekilde ve soğuk zincirde, tüpün üzerine isim veya kulak no yazılarak, aşı yapılmışsa tarihi, aynı test daha önce yapılmışsa bir önceki sonucu ve antibiyotik tedavisi uygulanıp uygulanmadığı bildirilerek laboratuvara gönderilmiş olmalıdır.

3.2.MOLEKÜLER TESTLER İÇİN

Doku, idrar ve kan numunesi: Leptospirozis ile ilgili klinik ve epidemiyolojik veriler var ise ve hastalık belirtilerinin üzerinden 10 gün veya daha az zaman geçmiş ise idrar, kan veya doku örneği gönderilecekse; özellikle karaciğer (periportal), böbrek (korteks) numunesi steril şekilde, soğuk zincirde gönderilmelidir.

3.3.İZOLASYON İÇİN

Böbrek karaciğer veya genital bölgeden steril olarak alınmış svaplar soğuk zincirde gönderilmelidir.

NOT: Laboratuvara getirilen/gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır. Analize alınan numuneler, muayene raporlarının yazımına kadar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürüne (VKMAE Pr.09) göre muhafaza edilecektir.

Spiroket Hastalıkları Laboratuvarına getirilen/gönderilen her numune Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilir.

Hazırlayan Lab.Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
-----------------------------	----------------------	-----------------------------

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE.T.05. <i>Spi</i>
		Yayın Tarihi:	03.01.2006
		Rev.Tarihi/No:	18.03.2025/11
		Sayfa/Toplam Sayfa:	2/2

Laboratuvara gelen numuneler raporlanma tarihinden itibaren 7 gün saklanır.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER:

VKMAE. Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE. Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtım ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE. Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

5. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE. Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinal nüshası Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyaları kullanıma açık olarak ***Spiroket Hastalıkları*** Laboratuvarı ve Numune Kabul ve Raporlama Şefliğinde bulunur.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	04.02.2008	6	Dağıtımın düzenlenmesi
02	17.04.2009	3	Numunenin gönderilme şartlarında düzeltme
03	13.02.2012	Genel	Dokümanların güncellenmesi ve elektronik ortama taşınması, 639 sayılı KHK gereği dokümanlarda değişiklik yapılması
04	27.01.2014	Genel	Logo değişikliği
05	14.11.2019	Genel	Logo değişikliği
06	06.01.2021	Genel	Güncelleme
07	24.05.2021	3	Numune saklama sürelerinin eklenmesi
08	27.06.2022	3	Güncellenmesi
09	11.05.2023	3	Numune saklama sürelerinin güncellenmesi
10	02.01.2025	Genel	Laboratuvar adının değiştirilmesi, güncelleme
11	18.03.2025	Genel	Laboratuvar adının değiştirilmesi

Hazırlayan Lab.Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
-----------------------------	----------------------	-----------------------------