

	TSE HASTALIKLARI TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.01.TSE
		Yayın Tarihi:	14.04.2025
		Rev.Tarihi/No:	00.00.0000/00
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/2
1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedüründe (VKMAE Pr. 09) belirtilmiştir. 2. SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası prosedüründe (VKMAE Pr.09) belirtilmiştir. 3. UYGULAMALAR TSE Hastalıkları Teşhis Laboratuvarına gelen beyin, obeks materyalleri muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP'larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır. 3.1. Numune Kabul Biriminin mesai saatleri dahilinde teşhis için (Hafta içi 09:00-18:00) gelen: Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Veteriner hekimleri tarafından marazi madde gönderme protokolü VELBİS sistemi üzerinden eksiksiz olarak doldurulmuş şekilde gönderilen beyin, obeks kısımları, TSE Hastalıkları Teşhis Laboratuvarında görevliler tarafından işleme alınır. Enstitü Müdürlüğüne gönderilen marazi madde/ler il/ilçe müdürlüklerinden sevsiz olarak gönderilemez. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından gönderilen beyin, obeks numuneleri makroskobik muayenelerde kokuşma ve otoliz bulguları gösteriyorsa muayeneye alınmaz. Nekropsi ya da mezbaha kesimleri sonrası alınan ve tespit edilmeden gönderilen beyin, obeks örnekleri, makroskobik muayenelerde kokuşma ve otoliz bulguları gösteriyorsa muayeneye alınmaz. Beyin, obeks numuneleri soğuk zincirde ya da %10 nötral formalin içeren kaplara konularak gönderilir. Gönderilen numuneler her yıl yayınlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gönderilmelidir. Millileştirilmemiş olan hayvanlara ait numuneler ücrete tabidir. Ücrete tabii olanların dekontları numune üst yazısına ekli olmalıdır. TSE Hastalıkları yönünden analiz istenilen tüm numuneler Numune Kabul Birimi tarafından ivedilikle laboratuvara gönderilmelidir. 3.2. Numune Kabul Biriminin mesai saatleri dışında teşhis için (Hafta içi 18:00-9:00 ve Hafta sonu) gelen:			
Hazırlayan Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü	

	TSE HASTALIKLARI TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.01.TSE
		Yayın Tarihi:	14.04.2025
		Rev.Tarihi/No:	00.00.0000/00
		Sayfa/TP.Sayfa:	2/2

Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Veteriner hekimleri tarafından Marazi Madde Gönderme Protokolü eksiksiz olarak doldurulmuş ve soğuk zincir ile gönderilen analiz yapılması gereken numuneler mesai saatine bakılmaksızın 24 saat içerisinde analiz işlemlerine başlanacak şekilde tedbir alınmalıdır. VKMAE lojmanlarında görev tahsisli ikamet eden TSE Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı uzmanı/ları tarafından gelen numunelerin analiz işlemleri başlatılır.

TSE Hastalıkları yönünden analiz istenilen tüm numuneler Numune Kabul Birimi tarafından ivedilikle laboratuvara gönderilmelidir.

TSE Hastalıkları Teşhis Laboratuvarında %10 formol içerisinde bekletilen numuneler trimleme işleminden sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilir. Bloklanmış doku örnekleri ise 5 (BEŞ) yıl süre ile muhafaza edildikten sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilir. ELİSA metodu ile analize alınan numunelerin analiz işlemleri tamamlandıktan sonra tüm numuneler Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilirler.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER:

VKMAE Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

5. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali Kalite İzleme Biriminde, kontrollü kopyalarından biri Numune Kabul Biriminde diğeri ise TSE Hastalıkları Teşhis Laboratuvarında bulunmaktadır.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01			

Hazırlayan Lab. Sorumlusu	Kontrol Eden KYBS	Onaylayan Enstitü Müdürü
------------------------------	----------------------	-----------------------------