

	NUMUNE KABUL TALİMATI	Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.TOK
		Yayın Tarihi:	10.07.2004
		Rev.Tarihi/No:	22.10.2024/04
		Sayfa/Tp.Sayfa:	1/4
1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı ve kapsamı, Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde belirtilmiştir. 2. SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü (VKMAE.Pr.09)'nde tanımlanmıştır. 3. UYGULAMALAR Toksikoloji Laboratuvarına analizler için getirilen/gönderilen numunelerde aranan şartlar şunlardır: 3.1. Pestisit Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri İçin -Doku ve İç Organlar: Post mortem olarak nekropsisi yapılmış hayvanların içorgan (karaciğer), doku örnekleri (kas dokusu) ve mide-bağırsak içerikleri (mide içeriği olmadığı durumlarda mide dokusu ve bağırsak kesitleri) var ise şüpheli materyal ile birlikte (hayvanın en son yediği ve ölümüne/akut zehirlenmeye neden olabileceği düşünülen şüpheli matriksler (yem/su/gıda maddesi vb.)) hiçbir işleme tabi tutulmadan ağız sıkıca kapatılmış uygun steril kaplarda ve soğuk zincirde kokuşma olmadan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir. -Yem: Şüpheli hayvan ölümlerinde hayvanın en son yediği ve akut zehirlenmeye neden olabileceği düşünülen yem numunesi yaklaşık 200-300g. olacak şekilde, ölen hayvana ait içorgan(karaciğer)/kas dokusu/mide-bağırsak içerikleri ile birlikte ağız kapalı torba/uygun steril kap içinde ve soğuk zincirde en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir. Hayvan ölümü yok ise toksikolojik muayene amacıyla (pestisit analizi) sadece yem numunesi laboratuvara gönderilmemelidir. -Su: Şüpheli hayvan ölümlerinde hayvanın en son içtiği ve akut zehirlenmeye neden olabileceği düşünülen su numunesi en az 500 ml olacak şekilde, ölen hayvana ait içorgan (karaciğer)/kas dokusu/mide-bağırsak içerikleri ile birlikte ağız kapalı ve temiz pet şişe içerisinde en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir. -Ölü Arı ve Petek: Yaklaşık 200-300 adet kadar ölü arı numunesi ağız kapalı bir kavanoz/plastik kap içerisinde, petek numunesi ise en az 200g. olacak şekilde ve 20X20 cm. ebatında tahta/ mukavva/ strafor kutu içerisinde en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.			
Hazırlayan Dr. Aysın B. YORULMAZ Laboratuvar Sorumlusu	Kontrol Eden M. Murat MADEN KYBS	Onaylayan Uzm. İsmail AYDIN Enstitü Müdürü	



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:	VKMAE. T.05.TOK
Yayın Tarihi:	10.07.2004
Rev.Tarihi/No:	22.10.2024/04
Sayfa/Tp.Sayfa:	2/4

-Süzme/Petekli Bal: En az 200 g. olacak şekilde ağzı kapalı sızdırmaz nitelikte sağlam kavanoz/plastik /metal kutu içerisinde en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

-Ölü Balık: Ölü balık numuneleri (**bütün balık**) kendi ortamının suyu bulunan ağzı sıkıca kapalı plastik torbalar veya kavanozlarda, en kısa sürede, soğuk zincirde ve kokuşma olmadan laboratuvara gönderilmelidir. **Dava konusu olacak balık ölümlerinde balık ve su numuneleri yetkililer ve şahitler huzurunda usulüne uygun olarak alınmalı, mühürlendikten sonra laboratuvara gönderilmelidir.**

3.2.Anabolik Madde Kalıntı Analizleri İçin

-İdrar: En az 100 ml idrar numunesi (sığır/koyun/keçi) ağzı sıkıca kapalı polietilen tüp/ kırılmamış cam kavanoz içerisinde soğuk zincirde en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

-Akut zehirlenme analizleri maksadıyla laboratuvara gönderilen numunelerde kokuşma ve bozulma varsa kabul edilmeyecektir.

-Anabolik madde kalıntı analizleri için Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında analize alınan İdrar numuneleri, Ulusal Kalıntı İzleme Planı gereği negatif numuneler için raporlama tarihini müteakip bir ay, pozitif numuneler için 2 ay süreyle, zehirlenme analizleri için analize alınan numuneler ise raporlama tarihini müteakip 5 iş günü süreyle laboratuarda uygun koşullarda muhafaza edilir ve süre bitiminde atık kontrol prosedüründe (VKMAE Pr. 21) belirtildiği şekilde imha edilir.

- Adli vakalarda gönderilen numuneler soğuk damgalı ve resmi mühürlü olarak ve mühür açılmadan laboratuvara gönderilmelidir.

-Laboratuara getirilen /gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır.

- Antrax ve toksikolojik yönden analizi istenen numunelerde önce bakteriyolojik yönünden analiz yapılır. Eğer antrax yönünden menfi ise toksikolojik analize alınır.

-Gereksiz zaman ve kimyasal madde kullanımının önlenmesi ile ekonomik kaybın en aza indirilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek uygun numuneler analiz maksadıyla laboratuvara gönderilmelidir;

- Atık vakalarında fetüs için toksikolojik muayene istenmemesi,

- Paraziter/Bakteriyel hastalık vb. şüphesiyle görülen arı vb. hayvan ölümlerinde önce hastalık yönünden analiz yapılmalı şayet sonuç menfi ise zehirlenme yönünden toksikolojik muayene analizi yapılması istenmelidir..

Hazırlayan
Dr. Ayşin B. YÖRULMAZ
Laboratuvar Sorumlusu

Kontrol Eden
M. Murat MADEN
KYBS

Onaylayan
Uzm. İsmail AYDIN
Enstitü Müdürü



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
T.05.TOK

Yayın Tarihi:

10.07.2004

Rev.Tarihi/No:

22.10.2024/04

Sayfa/Top.Sayfa:

3/4

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/ KAYNAKLAR VE EKLER:

VKMAE Pr.03 Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürü

VKMAE Pr.09 Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürü

VKMAE Pr.21 Atık Kontrol Prosedürü

Ulusal Kalıntı İzleme Planı

Hayvan Hastalıklarında Numune Alma ve Gönderme Talimatı.

5. KAYIT KONTROL

İlgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü ve Arşiv Prosedürüne (VKMAE Pr.03) göre saklanır.

6. DAĞITIM

Bu talimatın orijinali KİB'e, kontrollü kopyaları laboratuvara ve Numune Kabul ve Raporlama Şefliğine dağıtılır.

7. REVİZYON

Revizyon No	Tarih	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni
01	23.02.2005	1, 2, 3.9	Çıkarma, Ekleme
02	12.06.2006	3	Çıkarma, Ekleme
03	20.11.2008	1, 3,6	Çıkarma, Ekleme
04	08.05.2009	3,6	Çıkarma
05	29.09.2010	3,4	Muhafaza sürelerinin ve ilgili kaynağın eklenmesi
06	14.03.2012	1, 2, 3.3, 4, 5	639 sayılı KHK gereği dokümanlarda değişiklik ve dokümanların elektronik ortama taşınması, muhafaza sürelerinin ve ilgili kaynağın güncellenmesi
07	22.03.2013	Genel	Doküman kontrolü
08	07.05.2013	Onaylayan	Enstitü Müdürü değişikliği
09	28.05.2014	Genel	Güncelleme
10	31.07.2015	Genel	Güncelleme
11	18.05.2017	Genel	Güncelleme
12	22.11.2018	Genel	Güncelleme
13	26.04.2021	Genel	Bakanlık Logosu ile 4.İlgili Dökümanlar / Kaynalar ve Ekler'in güncellenmesi

Hazırlayan
Dr. Ayşin B. YORULMAZ
Laboratuvar Sorumlusu

Kontrol Eden
M. Murat MADEN
KYBS

Onaylayan
Uzm. İsmail AYDIN
Enstitü Müdürü



NUMUNE KABUL TALİMATI

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
T.05.TOK

Yayın Tarihi:

10.07.2004

Rev.Tarihi/No:

22.10.2024/04

Sayfa/Tp.Sayfa:

4/4

14

07.07.2022

3.1,3.2,3.3

Analiz maksadıyla
gönderilecek bazı numune
çeşitlerinin özellikleri ve
miktarlarının güncellenmesi.

15

13.10.2023

3.1

Analiz maksadıyla
gönderilecek bazı numune
çeşitlerinin özellikleri ve
miktarlarının güncellenmesi.

16

22.10.2024

3.1,4.

*Analiz maksadıyla
gönderilecek bazı numune
çeşitlerinin özellikleri ve
miktarları ile İlgili
Doküman / Kaynak ve Ek
kısımına Hayvan
Hastalıklarında Numune
Alma ve Gönderme
Talimatının eklenerek
güncellenmesi.*

Hazırlayan
Dr. Ayşın B. YORULMAZ
Laboratuvar Sorumlusu

Kontrol Eden
M. Murat MADEN
KYBS

Onaylayan
Uzm. İsmail AYDIN
Enstitü Müdürü