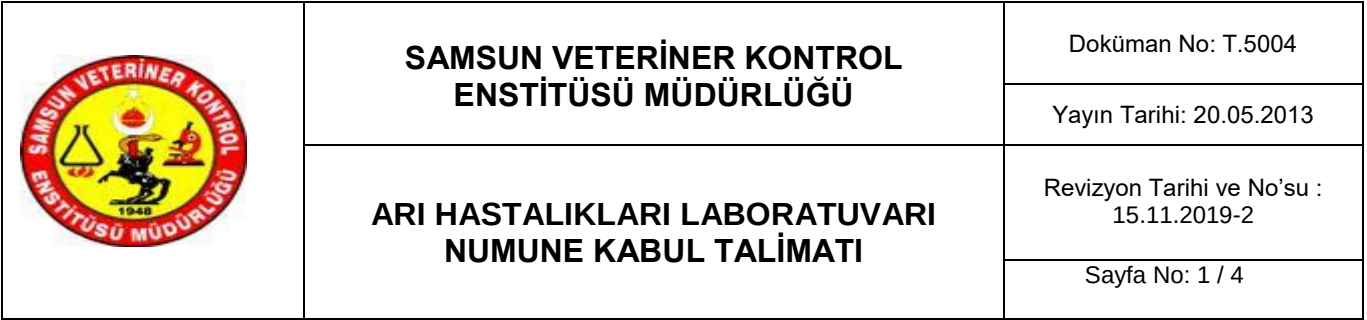


[illegible]

|                                            |                                               |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Hazırlayan                                 | Kontrol Eden                                  | Onaylayan                       |
| Dr. R***** A*****<br>Laboratuvar Sorumlusu | Dr. S***** K*****<br>Kalite Yönetim Sorumlusu | I***** A*****<br>Enstitü Müdürü |

|                                                                                   |                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>SAMSUN VETERİNER KONTROL<br/>ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ</b>        | Doküman No: T.5004                         |
|                                                                                   |                                                                | Yayın Tarihi: 20.05.2013                   |
|                                                                                   | <b>ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI<br/>NUMUNE KABUL TALİMATI</b> | Revizyon Tarihi ve No'su :<br>15.11.2019-2 |
|                                                                                   |                                                                | Sayfa No: 2 / 4                            |

## 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; SVKE Müdürlüğü tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardına uygun olarak oluşturulan sistemde, Arı Hastalıkları Laboratuvarı numune kabul kriterlerinin tanımlanmasıdır.

## 2. KAPSAM

Bu talimat SVKE’ne Arı hastalıklarının tanısı için gelen numunelerin, kabul kriterlerini kapsar.

## 3. SORUMLULAR

- Arı Hastalıkları Laboratuvarı ve Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili analizlerin yapılması ve sonucun raporlanmasından sorumludur.

## 4. TANIMLAR

NTS: Numune Takip Sistemi

## 5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE VERİLER

- Marazi madde gönderme protokolü F.405
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü P.413
- Atık İmha Talimatı T.5002
- Analiz İş Akış Prosedürü P.508
- Raporlama Prosedürü P.510
- Laboratuvar Yönetim Prosedürü P.511
- Marazi Madde Gönderme Protokolü F.405
- Marazi madde Teslim Tesellüm belgesi
- Numune Kabul Formu F.404
- Numune Dağıtım Tutanağı Formu F.525
- Test-Analiz Listesi L.409
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü P.413

## 6. TALİMATIN UYGULANIŞI

Bakanlığımız İl/İlçe ve Diğer Enstitü Müdürlükleri tarafından gönderilecek numune ile ilgili NTS üzerinden bir “Marazi Madde Gönderme Protokolü” oluşturulur. Sistemin çalışmadığı durumlarda

| Hazırlayan                                 | Kontrol Eden                                  | Onaylayan                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dr. R***** A*****<br>Laboratuvar Sorumlusu | Dr. S***** K*****<br>Kalite Yönetim Sorumlusu | İ***** A*****<br>Enstitü Müdürü |

|                                                                                   |                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>SAMSUN VETERİNER KONTROL<br/>ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ</b>        | Doküman No: T.5004                         |
|                                                                                   |                                                                | Yayın Tarihi: 20.05.2013                   |
|                                                                                   | <b>ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI<br/>NUMUNE KABUL TALİMATI</b> | Revizyon Tarihi ve No'su :<br>15.11.2019-2 |
|                                                                                   |                                                                | Sayfa No: 3 / 4                            |

veya gönderilecek numune sayının 5'in üzerinde olması durumunda “Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Genelgesi”nde yer alan “Marazi Madde Gönderme Formu” doldurulur. Marazi Madde Gönderme Protokolü/Formu doldurulmuş olarak gönderilen numuneler Numune Kabul Birimi tarafından NTS üzerinden ve marazi madde olarak kabul edilerek numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir. Eğer getirilen marazi madde il/ilçe müdürlüklerinden sevsiz ise enstitü Numune Kabul Formu doldurularak kabul edilir ve numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir.

Mesai saatleri dışında Enstitüye gelen marazi maddeler, Marazi Madde Teslim Tesellüm Belgesi doldurtularak ilgili görevliler tarafından teslim alınır. Teslim alınan numuneler mesai başlayana kadar nekropsi ünitesinde bulunan dolapta +4°C de muhafaza edilir.

Bakanlık dışındaki diğer müşterilerin talepleri üzerine kabul edilen numuneler, Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri İle Şap Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesi” ile belirlenen tarife üzerinden döner sermaye ücreti alınarak analize alınır. Döner Sermaye ücreti yatırılmamış, dekontu olmayan numuneler analize alınmaz.

Arı Hastalıkları Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi(ler) tarafından ilgili talimatlarda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

**Arı Numunesi:** Hastalıklı koloniden yaklaşık 400-500 adet kadar arı (canlı veya yeni ölmüş arılar), ağzı kapalı temiz bir kavanoz içerisinde ve en kısa sürede soğuk zincirde,

- **Petek Numunesi:** Petek örnekleri larvalı gözleri içeren en az 10 x 10 cm ebatında yada bir yavrulu peteğin tamamı veya kovan dip tahtası karton/tahta/strafor kutu içerisinde ve en kısa sürede gönderilmiş olmalıdır.
- **Temel Petek:** Amerikan yavru çürüklüğü kontrolü için temel petek üreten işletmelerden alınan örneklemede; her bir işletme için farklı noktalardan alınan ortalama 10 (bal mumu) temel petek örneği kağıda sarılmış halde ve karton/tahta/strafor kutularda en kısa zamanda gönderilmelidir.
- **Toksikolojik muayene;** için gönderilecek arı örnekleri en az 200 - 300 adet, bal ya da petek örneği gönderilecek ise en az 25 gram olmalı ve kavanoz içinde karton/tahta/strafor kutu içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

NOT: Laboratuvara getirilen/gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır. Enstitüye Arı Hastalıkları yönünden muayene için getirilen/gönderilen materyaller, Numune Kabul ve Raporlama Biriminden Arı Hastalıkları laboratuvarına orijinal ambalajı içinde gönderilir.

Arı Hastalıkları Laboratuvarına getirilen/gönderilen numuneler muayene bitiminde, bu numunelerden hazırlanan (tespit edilmiş/boyanmış) preparatlar, %70'lik alkol içerisinde ya da uygun bir saklama solüsyonu içerisinde daha uzun süre muhafaza edilebilen numuneler ise rapor sonucunun

| Hazırlayan                                 | Kontrol Eden                                  | Onaylayan                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dr. R***** A*****<br>Laboratuvar Sorumlusu | Dr. S***** K*****<br>Kalite Yönetim Sorumlusu | İ***** A*****<br>Enstitü Müdürü |

|                                                                                   |                                                        |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | SAMSUN VETERİNER KONTROL<br>ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ        |  | Doküman No: T.5004                         |
|                                                                                   |                                                        |  | Yayın Tarihi: 20.05.2013                   |
|                                                                                   | ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI<br>NUMUNE KABUL TALİMATI |  | Revizyon Tarihi ve No'su :<br>15.11.2019-2 |
|                                                                                   |                                                        |  | Sayfa No: 4 / 4                            |

gönderilmesinden 5 gün sonra **Atık İmha Talimatında** belirtildiği şekilde imha edilirler.

## 7. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** göre saklanır.

## 8. DAĞITIM

- Web sayfası üzerinden tüm müşterilere
- Numune Kabul ve Raporlama Birimi
- Arı Hastalıkları Laboratuvarı

| Hazırlayan                                 | Kontrol Eden                                  | Onaylayan                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dr. R***** A*****<br>Laboratuvar Sorumlusu | Dr. S***** K*****<br>Kalite Yönetim Sorumlusu | İ***** A*****<br>Enstitü Müdürü |