

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5005
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>BAKTERİYOLOJİ</u> LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 29.01.2026-4
		Sayfa No: 1/ 4

REVİZYONLAR				
Bölüm No/Adı	Sayfa No	Rev. Tarihi	Rev. No	Yapılan Revizyonun Açıklaması
KYB	3	04.12.2013	1	8.Dağıtım bölümü güncellendi.
Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarı	1,2,3, 4	30.10.2019	2	P.403'de yapılan revizyon gereği üst bilgi formatı değiştirilmiştir. 4.Tanımlar, 5.İlgili Dokümanlar ve Veriler, 6. Talimatın uygulanışı bölümünde güncelleme yapıldı. 8.Dağıtım güncellendi.
Bakteriyoloji Laboratuvarı	3	10.06.2025	3	%50 Gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde numune gönderilmesi ibaresi çıkartılmıştır. Şarbon hastalığına ait testler için numune gönderme şartları eklenmiştir.
Bakteriyoloji Laboratuvarı	1,2,3, 4	29.01.2026	4	Üst Bilgide güncelleme yapıldı. 1.AMAÇ kısmında güncelleme yapıldı. 6. TALİMATIN UYGULANIŞI kısmına numune türü eklendi.

ELEKTRONİK NÜSHADIR.
BASILİ HALİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR!

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. E***** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5005
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>BAKTERİYOLOJİ</u> LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 29.01.2026-4
		Sayfa No: 2/ 4

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; SVKE Müdürlüğü tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardına uygun olarak oluşturulan sistemde, Bakteriyoloji Laboratuvarı numune kabul kriterlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat SVKE’ne Bakteriyolojik Teşhis tanısı için gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

- Bakteriyoloji Laboratuvarı ve Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili analizlerin yapılması ve sonucun raporlanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

NTS: Numune Takip Sistemi

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE VERİLER

- | | |
|--|--------|
| • Marazi madde gönderme protokolü | F.405 |
| • Kayıtların Kontrolü Prosedürü | P.413 |
| • Biyogüvenlik ve Laboratuvar Güvenliği Talimatı | T.5023 |
| • Atık İmha Talimatı | T.5002 |
| • Analiz İş Akış Prosedürü | P.508 |
| • Raporlama Prosedürü | P.510 |
| • Laboratuvar Yönetim Prosedürü | P.511 |
| • Marazi Madde Gönderme Protokolü | F.405 |
| • Marazi madde Teslim Tesellüm belgesi | |
| • Numune Kabul Formu | F.404 |
| • Numune Dağıtım Tutanağı Formu | F.525 |
| • Test-Analiz Listesi | L.409 |
| • Kayıtların Kontrolü Prosedürü | P.413 |

6. TALİMATIN UYGULANIŞI

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. E***** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P***** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5005
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>BAKTERİYOLOJİ</u> LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 29.01.2026-4
		Sayfa No: 3/ 4

Numuneler, veteriner hekimin hastalık hakkındaki anamnez bilgileri, klinik bulguları ve yapılmış ise otopsi bulgularının yazıldığı muayene protokolü ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen numuneler ayrı ayrı alınıp, üzerlerine etiket bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından ölüm sebebinin araştırılması amacıyla gönderilecek numune ile ilgili **NTS** üzerinden bir “**Marazi Madde Gönderme Protokolü**” oluşturulur. Sistemin çalışmadığı durumlarda “**Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Genelgesi**”nde yer alan “**Marazi Madde Gönderme Formu**” doldurulur. **Marazi Madde Gönderme Protokolü/Formu** doldurulmuş olarak gönderilen numuneler **Numune Kabul Birimi** tarafından **NTS** üzerinden ve marazi madde olarak kabul edilerek numuneye bir **Enstitü Onay Numarası** verilir. Eğer getirilen marazi madde il/ilçe müdürlüklerinden sevsiz ise enstitü **Numune Kabul Formu** doldurularak kabul edilir ve numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir.

Laboratuvara gelen numuneler;

- Alınan numuneler şekillenen patolojik bulgulara bağlı olarak lezyonlu organ ve dokulardan steril şartlarda, 5x5 cm ebatlarında gönderilmelidir.
- Muayene için gönderilecek organ ve dokular: lezyonlu karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, beyin, lenf yumruları, uzun kemik, içerikli ince barsak, deri ile kan ve kan serumu, süt, idrar, sperma, BOS, vücut boşluklarındaki eksudatlar, gözyaşı akıntısı, tracheal ve intrauterin svaplar, et ve frotilerdir. Alınan numuneler bakteriyolojik muayeneye uygun olmalı, materyal taze kadavradan alınmalıdır. En geç ölümden 2 saat sonra alınıp soğuk zincirde en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- Şarbon (Anthrax) teşhisi için Froti, kan (otopsi yapılmamış ise) dalak, karaciğer, kalp, kas dokusu, kemik iliği, subseröz sıvılar (otopsi yapılmış ise) 24 saati geçmemiş taze örnekler şeklinde ve soğuk zincirde gönderilir. 24 saati geçmiş ve/veya kokuşmuş örneklerin analizi T.5373 Şarbon (Anthrax) Hastalığı'nın Teşhisi Real Time PCR talimatı uyarınca yapılır.
- Mastitis teşhisi için hasta meme loplari içerisindeki ilk sütler ayrı bir kaba alınmalıdır. Steril şartlarda alınan 5 - 8 ml süt numunesi soğuk zincirde, en geç 24 - 48 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- Gönderilecek idrar, steril şartlarda alınıp en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvarı sağlıklı bir teşhis yapılabilmesi için antibiyotik tedavisi uygulanmadan veya uygulama yapılmışsa 15-20 gün sonra numune gönderilmelidir.
- Rapor sonucunun gönderilmesinden 5 gün sonra Atık İmha Talimatı belirtildiği şekilde imha edilirler. Laboratuvara istenilen şartlarda uygun olarak gelen numuneler bakteriyolojik muayene sonucuna kadar buzdolabında (+4 - +80C'lerde) muhafaza edilir. Rapor yazımından sonra ilgili numune yakma fırınında imha edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. E***** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5005
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>BAKTERİYOLOJİ</u> LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 29.01.2026-4
		Sayfa No: 4/ 4

7. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** göre saklanır.

8. DAĞITIM

- Web sayfası üzerinden tüm müşterilere
- Numune Kabul/Raporlama Birimi
- Bakteriyoloji Laboratuvarı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. E***** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P***** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü