

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. N***** O***** Laboratuvar Sorumlusu	Dr. S***** K***** Kalite Yönetim Sorumlusu	İ***** A***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5007
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	BİYOKİMYA LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 18.11.2019-2
		Sayfa No: 2 / 4

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; SVKE Müdürlüğü tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardına uygun olarak oluşturulan sistemde, Biyokimya Laboratuvarı numune kabul kriterlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat SVKE’ne Biyokimya tanısı için gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Biyokimya Laboratuvarı ve Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili analizlerin yapılması ve sonucun raporlanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

NTS: Numune Takip Sistemi

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE VERİLER

• Marazi madde gönderme protokolü	F.405
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü	P.413
• Atık İmha Talimatı	T.5002
• <u>Biyogüvenlik ve Laboratuvar Güvenliği Talimatı</u>	<u>T.5023</u>
• <u>Analiz İş Akış Prosedürü</u>	<u>P.508</u>
• <u>Raporlama Prosedürü</u>	<u>P.510</u>
• <u>Laboratuvar Yönetim Prosedürü</u>	<u>P.511</u>
• <u>Numune Dağıtım Tutanağı Formu</u>	<u>F.525</u>
• <u>Test-Analiz Listesi</u>	<u>L.409</u>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. N***** O***** Laboratuvar Sorumlusu	Dr. S***** K***** Kalite Yönetim Sorumlusu	İ***** A***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5007
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	BİYOKİMYA LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 18.11.2019-2
		Sayfa No: 3 / 4

6. TALİMATIN UYGULANIŞI

Biyokimya Laboratuvarına gelen her türlü materyal (serum, yem, kıl ve doku ve balık örnekleri), muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi (ler) tarafından ilgili SOP'larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından ölüm sebebinin araştırılması amacıyla gönderilecek numune ile ilgili NTS üzerinden bir “Marazi Madde Gönderme Protokolü” oluşturulur. Sistemin çalışmadığı durumlarda “Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Genelgesi”nde yer alan “Marazi Madde Gönderme Formu” doldurulur. Marazi Madde Gönderme Protokolü/Formu doldurulmuş olarak gönderilen numuneler Numune Kabul Birimi tarafından NTS üzerinden ve marazi madde olarak kabul edilerek numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir. Eğer getirilen marazi madde il/ilçe müdürlüklerinden sevsiz ise enstitü Numune Kabul Formu doldurularak kabul edilir ve numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir.

Laboratuvara gelen numuneler;

- **Serum** : Serum örnekleri, en az 2 ml olmalı, kanla karışık veya hemolizli olmamalıdır. Serumun bulunduğu tüplerin üzerinde hayvana ait bilgilerin (Kulak numarası veya adı vs.) bulunduğu etiket yapıştırılmış olmalıdır. Serum soğuk zincirde uygun bir ambalaj içerisinde gönderilmelidir.
- **Yem**: Gönderilen yemler usulüne uygun bir şekilde alınıp, temiz naylon torba içerisinde ve kendine ait bilgiler açıklanarak gönderilmelidir
- **Yün/Yapağı** : Hayvanların boyun bölgesinden makasla bir tutam yün kesilmeli, numaralanıp naylon veya kağıt torbalarla gönderilmelidir.
- **Doku**: Doku örneği (kalp, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, bağırsak, kas vb.), koruyucu bir madde konmaksızın dondurularak, üzeri etiketlenmiş naylon torba veya kavanozda soğuk zincir içerisinde gönderilmelidir.
- **Süt**: En az 20 ml olmalı. Üzeri etiketli ve soğuk zincirde gönderilmeli.
- **Balık**: Koruyucu bir madde konmaksızın dondurularak, üzeri etiketlenmiş naylon torba veya kavanozda soğuk zincir içerisinde gönderilmelidir.
- **Toprak ve Su** : Hayvanların otladıkları bölgelerden toprak ve içilen su kaynaklarından alınan numuneler (100 g. / 100 mL'en az olmayacak) plastik torba ve cam kavanozlarına hiçbir konservatif madde ilave edilmeden gönderilmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. N***** O***** Laboratuvar Sorumlusu	Dr. S***** K***** Kalite Yönetim Sorumlusu	İ***** A***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5007
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	BİYOKİMYA LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 18.11.2019-2
		Sayfa No: 4 / 4

7. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** göre saklanır.

8. DAĞITIM

- Web sayfası üzerinden tüm müşterilere
- Numune Kabul ve Raporlama Birimi
- Biyokimya Laboratuvarı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. N***** O***** Laboratuvar Sorumlusu	Dr. S***** K***** Kalite Yönetim Sorumlusu	İ***** A***** Enstitü Müdürü