

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T. 5009
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARI</u> NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 28.01.2026-3 Sayfa No: 1/ 4

REVİZYONLAR				
Bölüm No/Adı	Sayfa No	Rev. Tarihi	Rev. No	Yapılan Revizyonun Açıklaması
KYB	3	21.11.2013	1	-6. Talimatın Uygulanışı bölümünde, kan serum örnekleri gönderileceği durumlarda uygulanması gereken santrifüj devir ve süresi eklendi.
KYB	1,2,3,4	16.6.2020	2	-6. Talimatın Uygulanışı maddeleri genel olarak revize edildi. -P.403'de yapılan revizyon gereği üst bilgi formatı değiştirilmiştir. Dağıtım bölümü güncellendi.
Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı	1,2,3	28.01.2026	3	-İsim değişikliği sebebiyle laboratuvar isminde yeniden düzenleme ve Dağıtım kısmında güncelleme

**ELEKTRONİK NÜSHADIR.
BASILI HALİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR!**

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. Y**** G**** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H**** K**** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T. 5009
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARI</u> NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 28.01.2026-3
		Sayfa No: 2/ 4

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; SVKE Müdürlüğü tarafından "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" Standardına uygun olarak oluşturulan sistemde, Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı (KHL) numune kabul kriterlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat SVKE'ne Kanatlı Hastalıkları tanısı için gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

- Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı ve Numune Kabul Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili analizlerin yapılması ve sonucun raporlanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE VERİLER

- F.405 Marazi Madde Gönderme Protokolü Formu
- P.804 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- T.5002 Atık İmha Talimatı

6. TALİMATIN UYGULANIŞI

Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi / kişiler tarafından ilgili SOP'larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

- Belirgin klinik bulgu gösteren 4-5 hayvan canlı olarak, hasta hayvan bulunamadığı durumlarda mümkün olduğunca fazla sayıda, açılmamış ve kokuşmamış taze ölümlerden gönderilir. Laboratuvara gönderilecek ölmüş kanatlı hayvan numunelerinin taze ve bütün kadavra halinde olması, canlı olarak gönderilecek hayvanların ise belirgin klinik gösteren 4-5 adet sayıda olması gerekmektedir. Bakteriyolojik analizler için gönderilecek kadvranın son 4 günde antibiyotik uygulanmamış olanlardan ve kokuşma olmayanlar gönderilmesi gerekir. Örnekler karton kutu, strafor veya kalın plastik naylon torba içerisine konulup sızdırmayacak biçimde ambalajlanıp etraflarına buz aküleri konularak soğuk ortamda gönderilir.
- Hasta ve ölümlerin kokuşmadan gönderilemeyeceği kadar uzak yerlerden materyal gönderilmesi gerektiğinde ise otopsi bulguları ve klinik bulgular veteriner hekim tarafından tespit edilerek

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. Y**** G**** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H**** K**** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T. 5009
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARI</u> NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 28.01.2026-3
		Sayfa No: 3/ 4

istenilen muayeneye göre (bakteriyolojik, histopatolojik, parazitolojik, virolojik) uygun şartlarda ve duruma özel bütün kadavra, dışkı, svab vb. gönderilir.

- Tarım ve Orman Bakanlığının Kanatlı Hayvan Hastalıkları ile ilgili geçerli mevzuatına göre (ilgili yönetmelik ve talimatlar vb) yapılır.
- Kloakal ve trakeal svab örnekleri hayvandan alınarak transport tüplerinde, soğuk şartlarda en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Kloakal ve trakeal svablar, 500 kanatlıya kadar olan kümeslerden en az 5 örnek, 500-2500 arası kanatlı bulunan kümeslerden en az 10 örnek, 2500 den fazla kanatlı bulunan kümeslerden en az 20 örnek olarak alınmalıdır.
- Sahadan gönderilecek numuneler (Avian İnfluenza gibi zoonoz riskleri sebebiyle) otopsi yapılmadan gönderilmelidir. Hastalık belirtisi gösteren hayvanların kadavra örnekleri soğuk zincirde, poşetler içinde en kısa sürede gönderilmelidir.
- Avian İnfluenza şüpheli durumlarda numuneler için kargo hizmeti kullanılmadan getirilmesi istenmektedir.
- Serolojik muayeneler için kan örnekleri, vena cutanea ulnaris'den steril enjektörlerle asepsi ve antisepsi kurallarına uyularak temiz endorf tüp veya cam tüplere 1-2 mL miktarındaki alınır. Pıhtılaşmış kan olarak veya kan serumu ayrılarak soğuk şartlarda laboratuvara gönderilir. Kan serumu gönderilen durumlarda pıhtılaşmış kan örneği 3000 rpm'de 10 dakika santrifüj edilmelidir. Mycoplasma yönünden test edilmesi istenecek kan serumları örnekler dondurulmamalıdır. Serumlar kontamine ve hemoliz olması istenmez. Zorunlu olmadıkça enjektör içinde kan örneği getirilmemelidir.
- Avian influenza dışında analizler için kanatlı hayvanlardan alınacak dışkı örnekleri kloakadan alınarak, Salmonella gibi zoonoz bakteriyel etkenlerin taranmasında çevresel dışkı ve toz örnekleri ilgili taşıyıcı materyaller (temiz plastik gaita kutusu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba) içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.
- Yem örnekleri yaklaşık 200-300 gr miktarında temiz bir naylon poşet veya kutu içerisinde ve soğuk zincirde gönderilir.
- Yumurta, yumurta viyölü içerisinde iyi bir şekilde ambalajlanarak gönderilir.

7. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** göre saklanır.

8. DAĞITIM

- Numune Kabul Birimine
- Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı personeline
- Server üzerinden tüm personele

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. Y**** G**** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H**** K**** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T. 5009
		Yayın Tarihi: 20.05.2013
	<u>KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARI</u> NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 28.01.2026-3
		Sayfa No: 4/ 4

- Web sayfası üzerinden tüm müşterilere

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. Y**** G**** Laboratuvar Sorumlusu	R***** P**** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H**** K**** Enstitü Müdürü