


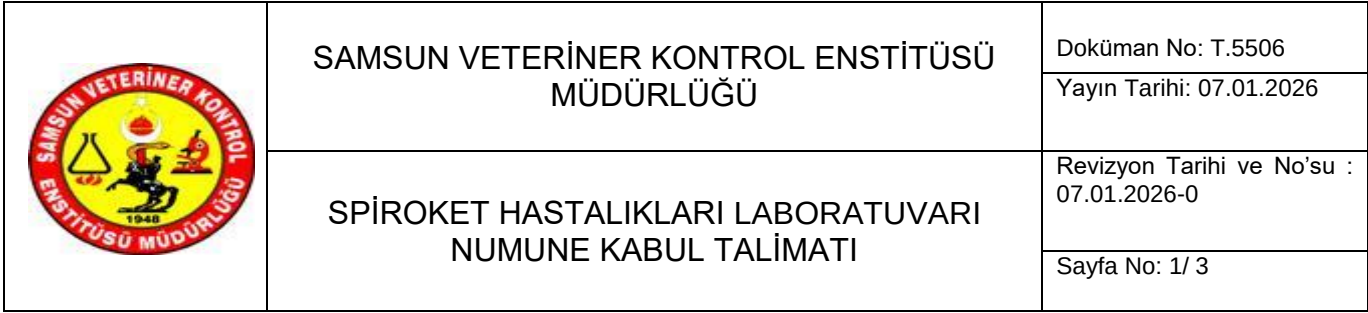

REVİZYONLAR

[illegible]

**ELEKTRONİK NÜSHADIR.
BASILI HALİ KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR!**

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. G**** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R**** P***** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5506
		Yayın Tarihi: 07.01.2026
	SPİROKET HASTALIKLARI LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Revizyon Tarihi ve No'su : 07.01.2026-0
		Sayfa No: 2/ 3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; SVKE Müdürlüğü tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardına uygun olarak oluşturulan sistemde, Spiroket Hastalıkları Laboratuvarı numune kabul kriterlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat SVKE'ne Leptospirozis tanısı için gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Spiroket Hastalıkları Laboratuvarı ve Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili analizlerin yapılması ve sonucun raporlanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

NTS: Numune Takip Sistemi

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE VERİLER

• Marazi madde gönderme protokolü	F.405
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü	P.413
• Biyogüvenlik ve Laboratuvar Güvenliği Talimatı	T.5023
• Atık İmha Talimatı	T.5002
• Analiz İş Akış Prosedürü	P.508
• Raporlama Prosedürü	P.510
• Laboratuvar Yönetim Prosedürü	P.511
• Marazi Madde Gönderme Protokolü	F.405
• Marazi madde Teslim Tesellüm belgesi	
• Numune Kabul Formu	F.404
• Numune Dağıtım Tutanağı Formu	F.525
• Test-Analiz Listesi	L.409
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü	P.413

6. TALİMATIN UYGULANIŞI

Numuneler, veteriner hekimin hastalık hakkındaki anamnez bilgileri, klinik bulguları ve yapılmış ise otopsi bulgularının yazıldığı muayene protokolü ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen numuneler ayrı ayrı alınıp, üzerlerine etiket bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. G**** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R**** P***** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü

	SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No: T.5506
	SPİROKET HASTALIKLARI LABORATUVARI NUMUNE KABUL TALİMATI	Yayın Tarihi: 07.01.2026
		Revizyon Tarihi ve No'su : 07.01.2026-0
		Sayfa No: 3/ 3

Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından hastalık/ölüm sebebinin araştırılması amacıyla gönderilecek numune ile ilgili NTS üzerinden bir “**Marazi Madde Gönderme Protokolü**” oluşturulur. Sistemin çalışmadığı durumlarda “**Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Genelgesi**”nde yer alan “**Marazi Madde Gönderme Formu**” doldurulur. **Marazi Madde Gönderme Protokolü/Formu** doldurulmuş olarak gönderilen numuneler **Numune Kabul Birimi** tarafından NTS üzerinden ve marazi madde olarak kabul edilerek numuneye bir **Enstitü Onay Numarası** verilir. Eğer getirilen marazi madde il/ilçe müdürlüklerinden sevsiz ise enstitü **Numune Kabul Formu** doldurularak kabul edilir ve numuneye bir Enstitü Onay Numarası verilir.

Spiroket Hastalıkları Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuvar şartlarında muayeneyi yapacak kişi(ler) tarafından, ilgili talimatta belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

6.1. SEROLOJİK TESTLER İÇİN

Kan Serumı: Leptospirozis ile ilgili klinik ve epidemiyolojik veriler var ise ve hastalık belirtilerinin üzerinden 10 günden daha fazla zaman geçmiş veya kaç gün geçtiği bilinmiyorsa vakumlu tüp içinde veya kan pıhtılaştıktan sonra serumu steril ependorf içinde, hemolizsiz, 1-2 ml olacak şekilde ve soğuk zincirde, tüpün üzerine isim veya kulak no yazılarak, aşı yapılmışsa tarihi, aynı test daha önce yapılmışsa bir önceki sonucu ve antibiyotik tedavisi uygulanıp uygulanmadığı bildirilerek laboratuvara gönderilmiş olmalıdır.

6.2. İZOLASYON İÇİN

Böbrek, karaciğer veya genital bölgeden steril olarak alınan svaplar soğuk zincirde gönderilmelidir.

İstenilen şartlarda uygun olarak laboratuvara gelen numuneler muayene sonucuna kadar buzdolabında (+4°C)'de muhafaza edilir. Laboratuvara gelen numuneler raporlanma tarihinden itibaren 7 gün (+4°C)'de saklanır ve daha sonra Atık İmha Talimatı'nda belirtildiği şekilde imha edilirler.

7. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** göre saklanır.

8. DAĞITIM

- Web sayfası üzerinden tüm müşterilere
- Numune Kabul Birimi
- Spiroket Hastalıkları Laboratuvarı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Dr. G**** S***** Laboratuvar Sorumlusu	R**** P***** Kalite Yönetim Sorumlusu	Dr. H***** K***** Enstitü Müdürü